

Step-by-step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS



en
Warning:
Agent-specific filling
cannot be assured when
bottles without collars
are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.









de
Warnung:
Substanzspezifisches
Einfüllen kann nicht
sichergestellt werden,
wenn Flaschen ohne Fla-
schenkragen verwendet
werden. Nicht spülma-
schinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe
Deckel.





fr
Avertissement:
Le remplissage spéci-
fique à l'agent ne peut
pas être assuré, sides
bouteilles sans cols sont
utilisées!
Ne passe pas au
lave-vaisselle.
Date de péremption:
voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie
senza collo non si può
assicurare un riempi-
mento della sostanza
specifica.
Non adatto per lavasto-
viglie.
Data scadenza:
vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar
el llenado del agente
específico cuando se
usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad:
ver tapa.

pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania
butelek bez kołnierzy,
mogą występować pro-
blemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmy-
warce. Data ważności:
patrz opakowanie.

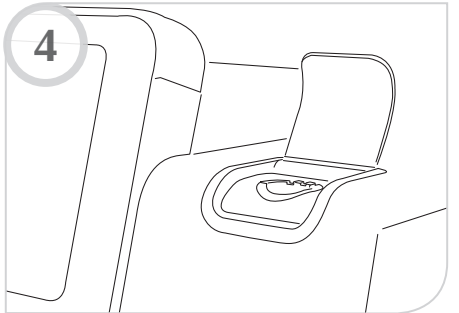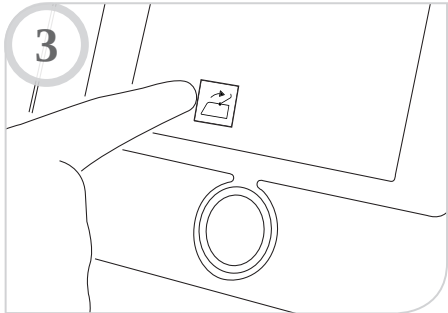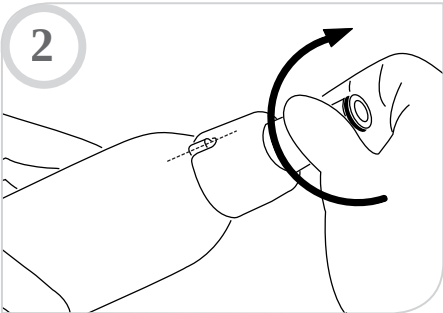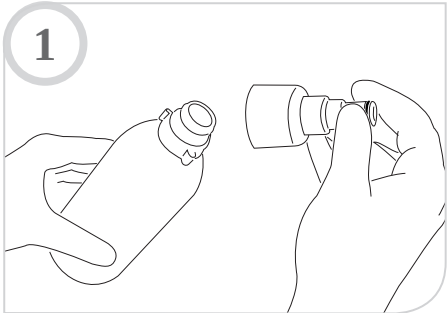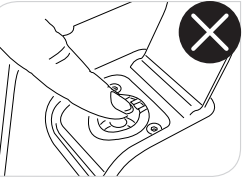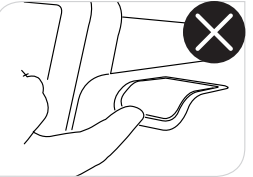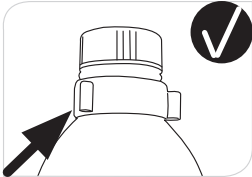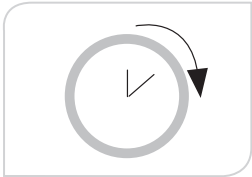

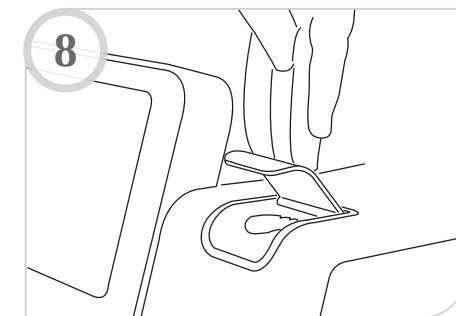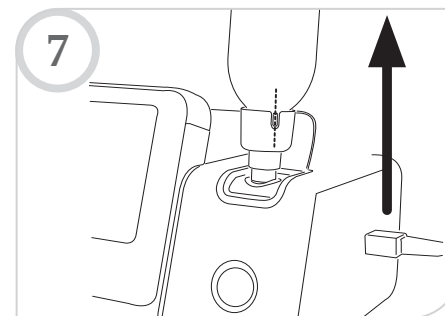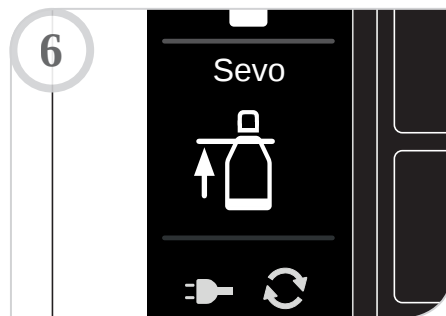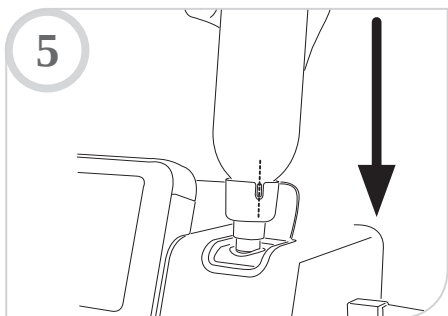

Warning! Small amounts of VA can escape.

- Wait 4 seconds. Then slowly pull out bottle.

Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.

- 4 Sek. warten. Danach Flasche langsam herausziehen.

Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.

- Attendez 4 secondes. Ensuite, tirez lentement la bouteille.

Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.

- Aspetta 4 secondi. Poi estrarre lentamente la bottiglia.

¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.

- Espera 4 segundos. Luego, lentamente saca la botella.

Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.

- Poczekaj 4 sekundy. Następnie powoli wyciągnij butelkę.



Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)
August-Thyssen-Straße 30
D-56070 Koblenz
Germany
T.: +49 (0) 261 899 689 00
F.: +49 (0) 261 899689 09
info@tim-gmbh.de
www.tim-gmbh.de