


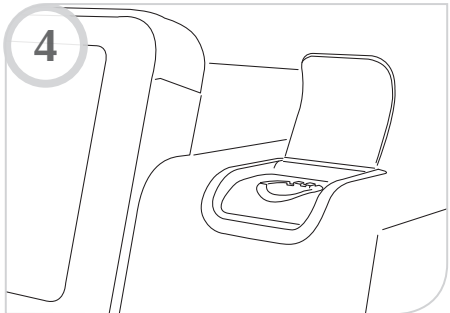
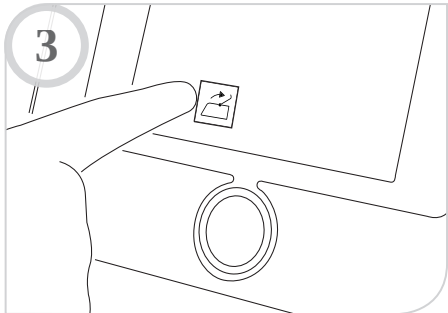
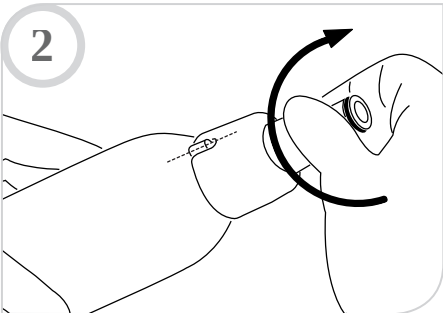
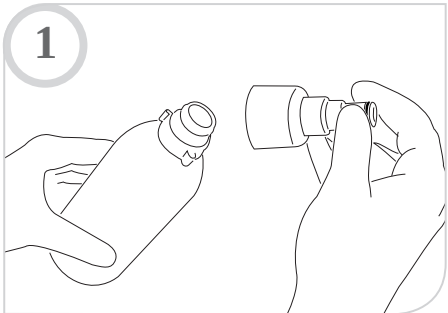
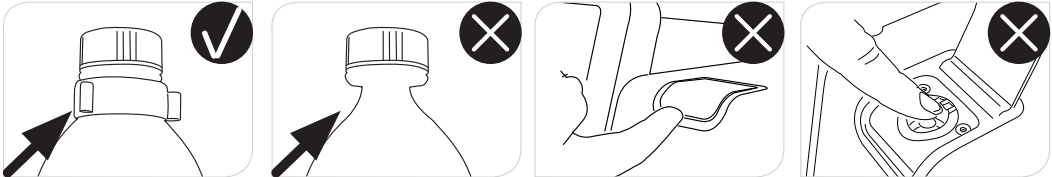
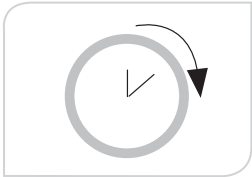
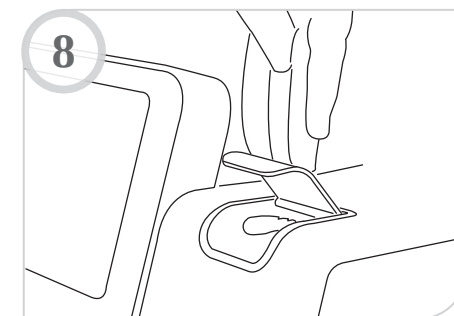


Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS

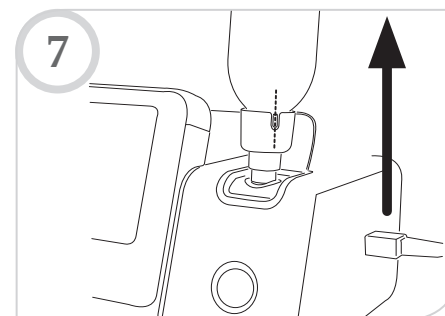

	<p>en Warning: Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used! Not dishwasher safe. Expiration date: see lid.</p>	<p>de Warnung: Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet. Verfallsdatum: siehe Deckel.</p>	<p>fr Avertissement: Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, sides bouteilles sans cols sont utilisées! Ne passe pas au lave-vaisselle. Date de péremption: voir bouchon.</p>	<p>it Avvertenza: Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica. Non adatto per lavastoviglie. Data scadenza: vedi coperchio.</p>	<p>es Advertencia: ¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar! No apto para lavavajillas. Fecha de caducidad: ver tapa.</p>	<p>pl Ostrzeżenie: W przypadku używania butelek bez kołnierzy, mogą występować problemy z napełnieniem. Nie można myć w zmywarce. Data ważności: patrz opakowanie.</p>
--	---	---	--	--	--	--

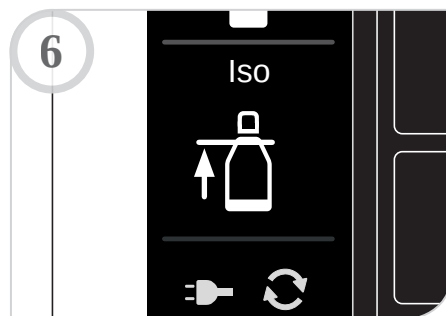

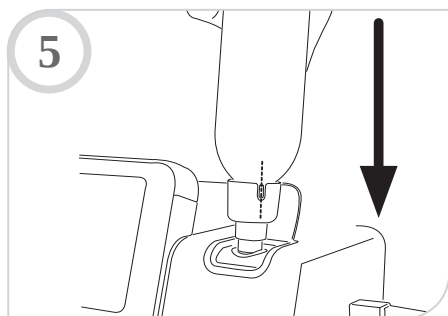

Warning! Small amounts of VA can escape.

- Wait 4 seconds. Then slowly pull out bottle.

Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.

- 4 Sek. warten. Danach Flasche langsam herausziehen.

Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.

- Attendez 4 secondes. Ensuite, tirez lentement la bouteille.

Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.

- Aspetta 4 secondi. Poi estrarre lentamente la bottiglia.

¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.

- Espera 4 segundos. Luego, lentamente saca la botella.

Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.

- Poczekaj 4 sekundy. Następnie powoli wyciągnij butelkę



Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)
August-Thyssen-Straße 30
D-56070 Koblenz
Germany
T.: +49 (0) 261 899 689 00
F.: +49 (0) 261 899 689 09
info@tim-gmbh.de
www.tim-gmbh.de