

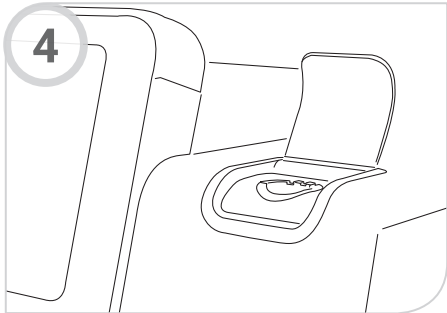
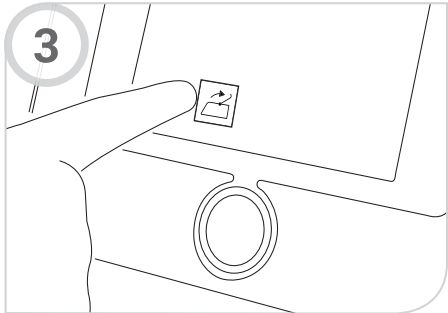
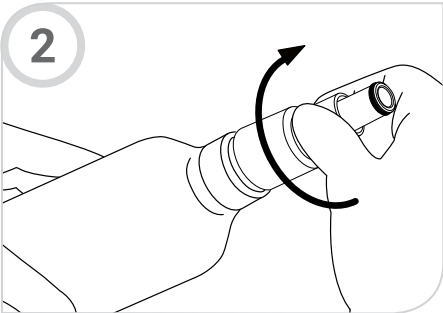
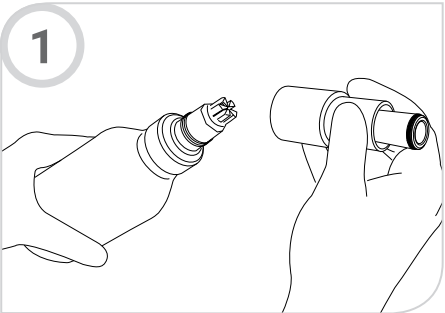
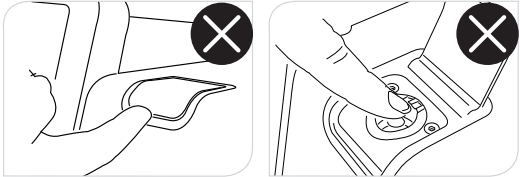
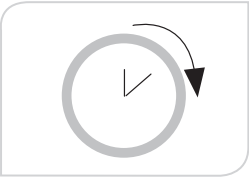
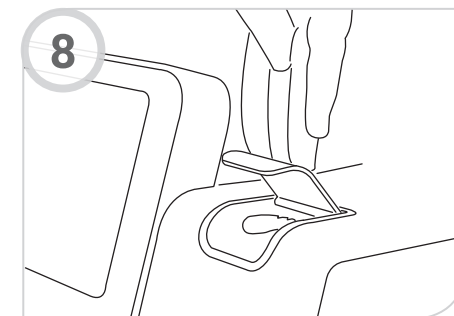
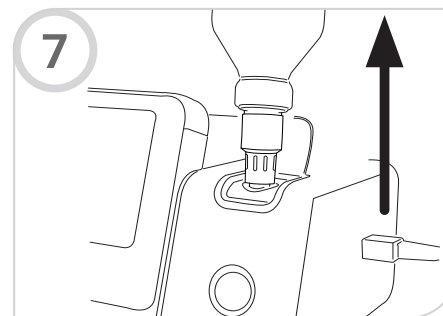


Quick guide / Kurzanleitung / Guide rapide / Guida rapida / Guía rápida /
Skrócona Instrukcja używania

	en Warning: Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used! Not dishwasher safe. Expiration date: see lid.	de Warnung: Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet. Verfallsdatum: siehe Deckel.	fr Avertissement: Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, sides bouteilles sans cols sont utilisées! Ne passe pas au lave-vaisselle. Date de péremtion: voir bouchon.	it Avvertenza: Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica.Non adatto per lavastoviglie. Data scadenza: vedi coperchio.	es Advertencia: ¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar! No apto para lavavajillas. Fecha de caducidad: ver tapa.	pl Ostrzeżenie: W przypadku używania butelek bez kołnierzy, mogą występować problemy z napełnieniem. Nie można myć w zmywarce. Data ważności: patrz opakowanie.
--	--	--	--	--	---	---

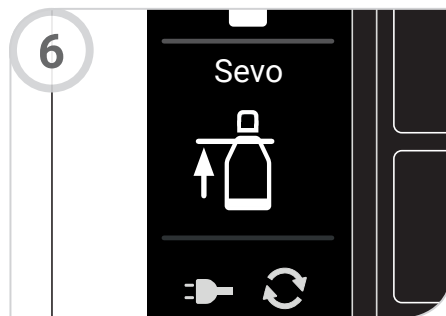

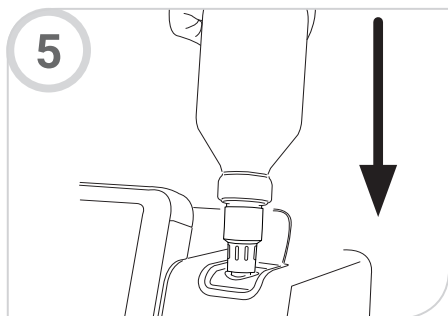

(en) Warning! Small amounts of VA can escape.

► Wait 4 seconds. Then slowly pull out bottle.

(de) Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.

► 4 Sek. warten. Danach Flasche langsam herausziehen.

(fr) Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.

► Attendez 4 secondes. Ensuite, tirez lentement la bouteille.

(it) Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.

► Aspetta 4 secondi. Poi estrarre lentamente la bottiglia.

(es) ¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.

► Espera 4 segundos. Luego, lentamente saca la botella.

(pl) Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.

► Poczekaj 4 sekundy. Następnie powoli wyciągnij butelkę.

